



TASKA™

PROSTHETICS

Guía de usuario de INICIO RÁPIDO

Mano TASKA



Contenido de la caja



TASKA-XXXX

Mano TASKA
(Se muestra muñeca
de desconexión rápida)



TASKA-BRHD-01

2x placas frontales superiores



Cargador de coche **TASKA-CC-01**

Entrada: 12 V CC. Salida: 8.4 V
Corriente de carga: 1A máx.



Cargador para enchufe
de pared **TASKA-MC-01**

Entrada: 100-240 V CA 50 - 60 Hz,
ajuste automático. Salida: 8.4 V
Corriente de carga: 1A máx.



Destornillador T6



Piezas brutas



TASKA-BTA-01

Adaptador USB
para Bluetooth



TASKA-PWR-01

Toma de cargador



Agarres
de repuesto



TASKA-BIG1-01

Batería

**Incluidos
en la versión
Perfil Bajo:**



Collar y
tornillos perfil bajo



Tapón enmascarador
perfil bajo



Cubiertas de
interruptor



Directrices de seguridad

Cuando use su Mano TASKA, le rogamos que siga estas directrices de seguridad. Si no lo hace, podría dañar la mano o lastimarse usted mismo o a otras personas. No hacerlo también puede invalidar la garantía de su mano. Se ruega consulte la Guía de Uso Adecuado de TASKA para obtener un listado completo de advertencias:

- Antes de conducir un vehículo usando su Mano TASKA, asegúrese de que tiene autorización legal para operar el vehículo con ayuda de una prótesis.
- Cuando use una muñeca de “desconexión rápida”, no permita que el conector de la muñeca se sumerja en agua.
- No sumerja la mano en agua durante más de 30 minutos cada vez.
- No exponga la mano a riesgos que podrían lastimar una mano natural, por ejemplo:
 - Altas temperaturas
 - Llamas ardientes
 - Fuertes impactos
 - Frío extremo
 - Vibraciones rápidas
 - Explosiones
 - Productos químicos corrosivos
 - Maquinaria de alto riesgo
- Todo intento no autorizado de reparar o alterar la mano invalidará su garantía. Usted puede reemplazar la placa dorsal (placa en lado del panel de botones), pero no puede cambiar ninguna otra parte de la mano de ninguna forma. Asegúrese de que cualquier otra parte de la mano sea manipulada únicamente por personas autorizadas por TASKA.
- Cuando cargue la batería, use siempre cargadores suministrados por TASKA.

Acoplamiento de la mano a la cavidad articular

Si su Mano TASKA ha sido suministrada junto con una muñeca de “desconexión rápida”, le será muy fácil acoplar y desacoplar la mano.

Para acoplar la mano:

1. Alinee la conexión de muñeca de la mano con la cavidad articular.
2. Fuércelos ligeramente el uno contra el otro hasta que oiga un clic, lo que significa que la mano ha sido acoplada con éxito a la cavidad.

Para desacoplar la mano:

1. Rote la mano y la cavidad en direcciones opuestas y tire de la mano suavemente hacia afuera de la cavidad.
2. Cuando la rotación haya llegado al punto correcto, la mano se desacoplará totalmente de la cavidad.

Encendido y apagado de la mano

La cavidad tiene un botón que sirve para encender o apagar la Mano TASKA. Antes de encender la mano, asegúrese de que no hay nada que impida a los dedos y al pulgar abrirse hasta su máxima extensión.

Esto ayudará a que los sensores de posición se fijen correctamente mientras se enciende la mano.



Para encender la mano, pulse el botón una vez. Mientras se enciende la mano, dos de las luces en el dorso de la mano parpadearán brevemente y los dedos se abrirán. La mano estará lista para su uso tan pronto como ocurra esto. Si los dedos o el pulgar no se posicionan correctamente (por ejemplo, si el dedo índice y el pulgar no consiguen tocarse cuando activa el agarre en pinza), haga lo siguiente:

1. Apague la mano.
2. Compruebe que no hay nada bloqueando el movimiento del pulgar y los dedos.
3. Encienda de nuevo la mano. Al hacerlo se reiniciará con el posicionamiento correcto.

Carga de baterías

Use únicamente los cargadores suministrados por TASKA para cargar las baterías de la Mano TASKA.

Desacople la mano y la cavidad del brazo de su miembro residual antes de cargar la mano. El punto de carga es una toma magnética situada al lado del botón de encendido.



Para cargar la mano:


1. Acerque la punta magnética del cable de carga a la toma magnética. Ambas se alinearán automáticamente.
2. Conecte el cargador a un enchufe de la pared si usa el cargador de pared o una entrada de 12V si usa el cargador del coche. La carga se iniciará tan pronto como el cargador reciba suministro eléctrico. La luz del cargador se tornará roja.

La carga completa de una batería descargada tarda unas cuatro horas. Cuando se complete la carga, la luz del cargador se tornará verde.

Totalmente cargada, la batería podrá alimentar unas 400 acciones de agarre como mínimo. Se recomienda que cargue la batería cada noche. Esto ayudará a que no se quede sin batería mientras esté usando la mano. La batería de la Mano TASKA no perderá capacidad gracias a su "memoria de carga". Recargar la batería con frecuencia cuando sólo esté parcialmente descargada no afectará su vida útil.

Esquema de botones y luces

Tres botones en la parte trasera de la mano le permiten controlar rápidamente la selección de agarres y cambiar algunas opciones de comunicación. El panel en el dorso de la mano también tiene 5 luces que muestran diferentes tipos de alerta y estatus.

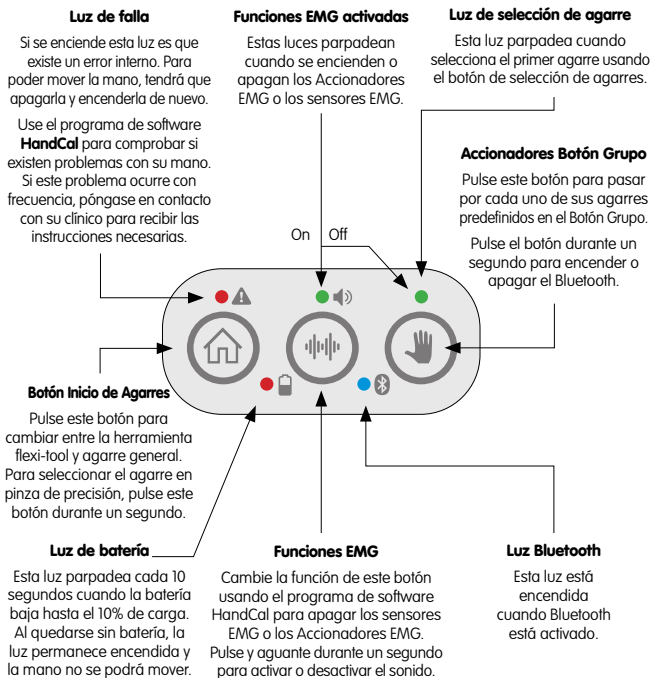

Uso de la mano TASKA en la vida cotidiana

La memoria de la Mano TASKA Hand contiene más de 20 patrones de agarre. Sin embargo, usted puede llevar a cabo actividades cotidianas con sólo tres agarres de uso más frecuente: **agarre ligero general**, herramienta **flexi-tool** y **agarre en pinza de precisión**. A continuación, se ofrece varios ejemplos de cómo la Mano TASKA puede ayudarle a hacer más cada día:

Agarre ligero general



Cortar el césped



Lavar el coche



llevar a cabo actividades de apoyo



Realizar tareas de jardinería



Abrir una botella con facilidad



Llevar botellas

Herramienta Flexi-Tool



Agarrar cubiertos



Cortar su propia comida



Agarrar objetos finos con firmeza



Agarrar ropa de cama



Usar aparatos móviles con facilidad



Socializar con confianza



Atarse los cordones de los zapatos



Escribir con un bolígrafo

Agarre en pinza de precisión



Levantar pequeños objetos con precisión



Levantar objetos delicados con cuidado

Sáquele el máximo partido a su Mano TASKA


A medida que vaya haciéndose más experto en el uso de su Mano Taska, usted querrá seguir aprendiendo las cosas que esta puede hacer y cómo usarla cada vez más en sus tareas cotidianas.

Nuestra empresa suministra un amplio abanico de recursos para ayudarle a sacar el máximo partido a su Mano TASKA:

- Videos de instrucción
- Guías de instrucciones claras paso a paso
- Noticias en canales de medios sociales. Encuéntrenos en @TaskaGlobal y participe en la comunidad TASKA.
- Aplicaciones para su teléfono móvil, ordenador portátil o de sobremesa, que usted puede usar para personalizar su mano.

Para usar estos recursos, solo tiene que registrarse como propietario de Mano TASKA en la siguiente página web: www.taskaprosthetics.com

Aplicación TASKA

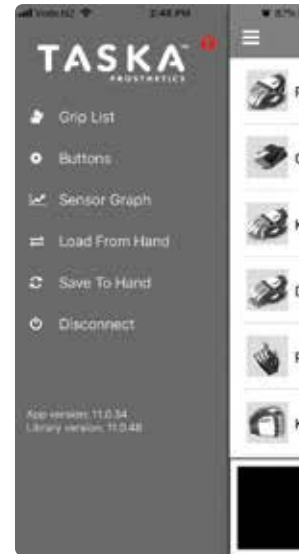

Todos los propietarios registrados de una Mano TASKA pueden descargarse la aplicación gratuita a todos sus aparatos móviles y ordenadores sin límite. La aplicación TASKA es una herramienta imprescindible que le permite hacer lo siguiente:

- Configurar botón & conjuntos de agarre electromiográficos
- Solucionar problemas de sensores
- Ajustar las configuraciones de capacidad de reacción

Y más...

Visite la página web: www.taskaprosthetics.com para obtener la Aplicación y sea testigo de lo bien que puede funcionar la Mano TASKA en su vida cotidiana.

Cómo obtener ayuda

Para obtener apoyo y ayuda a la hora de usar su Mano TASKA, póngase en contacto primero con el clínico que le atendió para encajar bien la mano y familiarizarse con ella.

Si no puede ponerse en contacto con su clínico, envíenos un mensaje a la dirección de correo electrónico support@taskaprosthetics.com para encontrar un clínico adecuado cerca de usted.

Los usuarios registrados también puedan solicitar ayuda rellenando y enviando el formulario que se halla disponible en la página web: www.taskaprosthetics.com





TASKATM

PROSTHETICS

10 Nelson St, Riccarton, Christchurch, Nueva Zelanda
www.taskaprosthetics.com | support@taskaprosthetics.com



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haya
Países Bajos - UE